


Notice d'utilisation de Capriscope

1. Prérequis


Le logiciel Capriscope fonctionne essentiellement sur Windows 10 avec l'iriscope <**USB Iriscope numérique (Modèle : IRS-8200U)**> distribué par SASU Pérolines'M représentée par Martine ROUX.

2. Installation

- Double-cliquer sur le programme d'installation "capriscope_setup.exe" téléchargé précédemment.

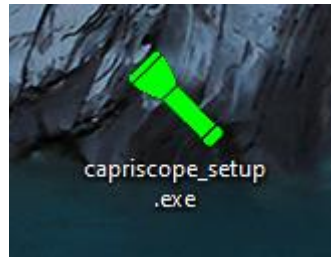


- Une fenêtre demandant l'autorisation de l'administrateur apparaît.
- Valider en cliquant sur oui.
- La fenêtre de première étape de l'installation apparaît.

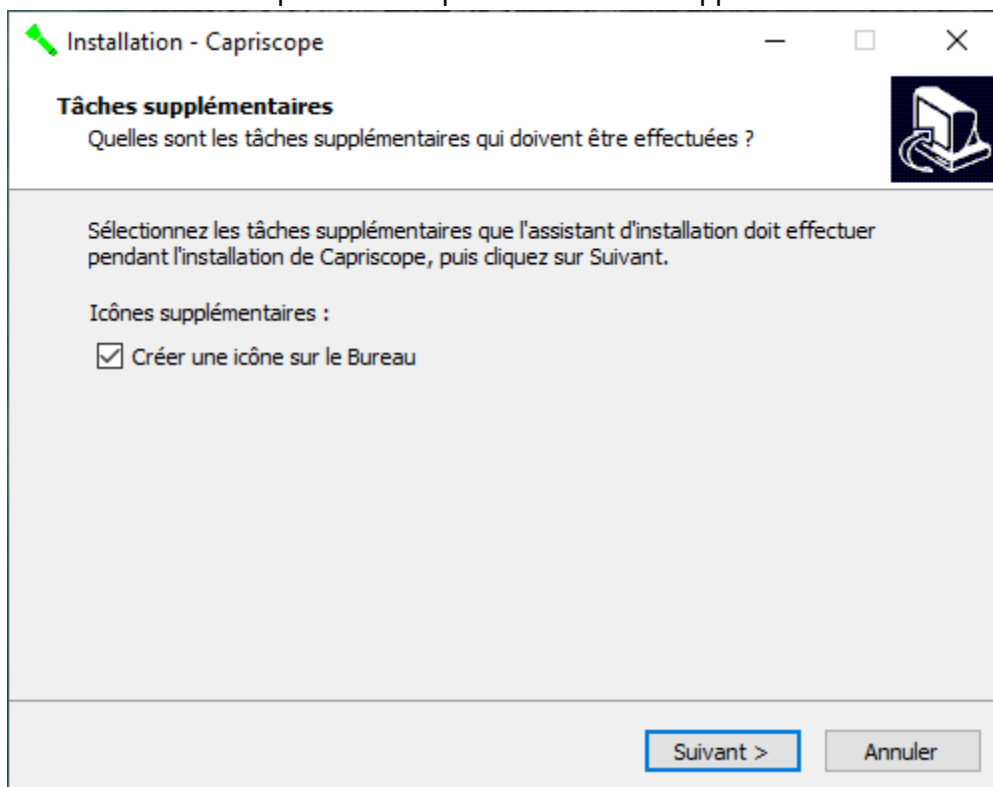


- Vérifier que la case "Créer une icône sur le Bureau" est bien cochée.

- Cliquer sur “Suivant >”
- La fenêtre de confirmation d’installation apparaît.

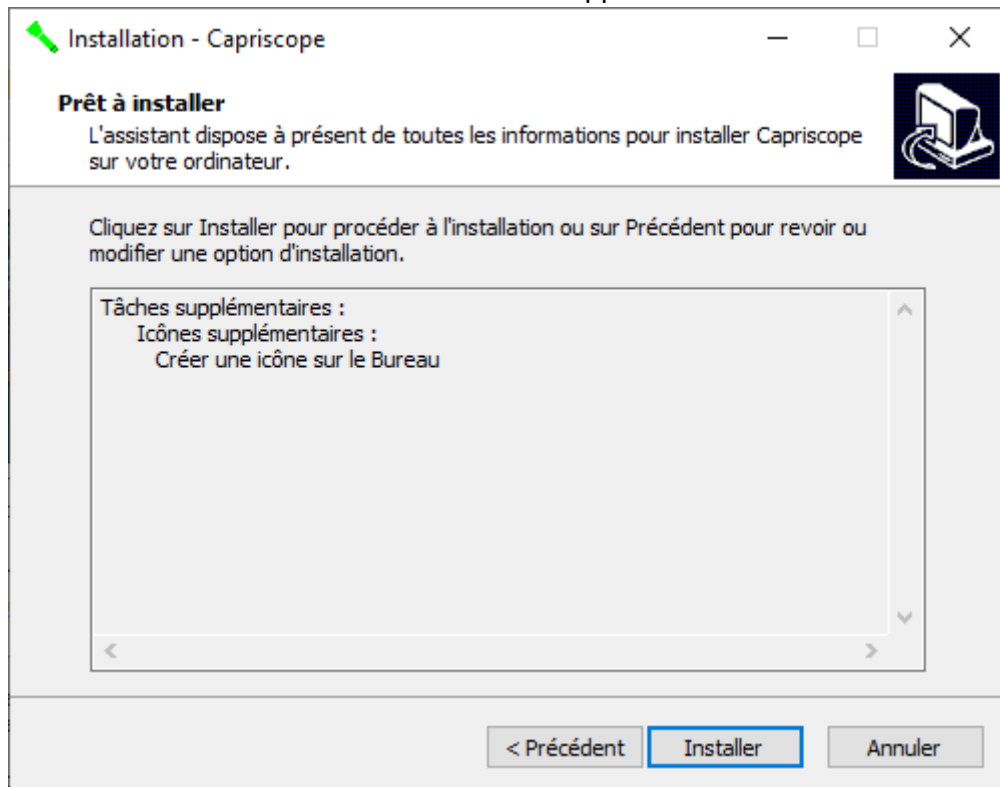

- Cliquer sur installer.
- La fenêtre de fin d'installation apparaît.

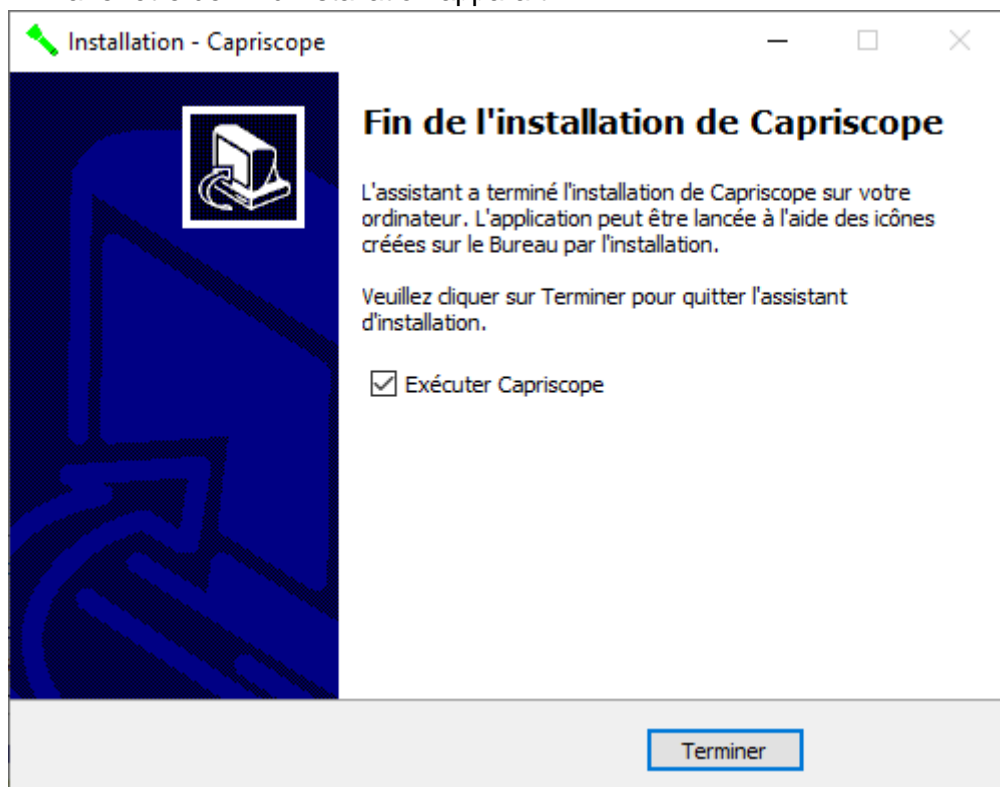


- Cliquer sur terminer et laisser la case “Exécuter Capriscope” cochée pour lancer directement Capriscope.


3. Utilisation

a. Démarrage de Capriscope

- Lancer Capriscope à partir de l'icône sur le bureau

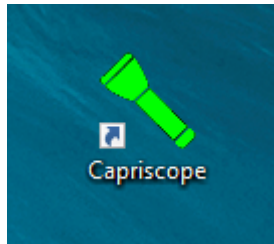


- L'écran de démarrage de Capriscope apparaît

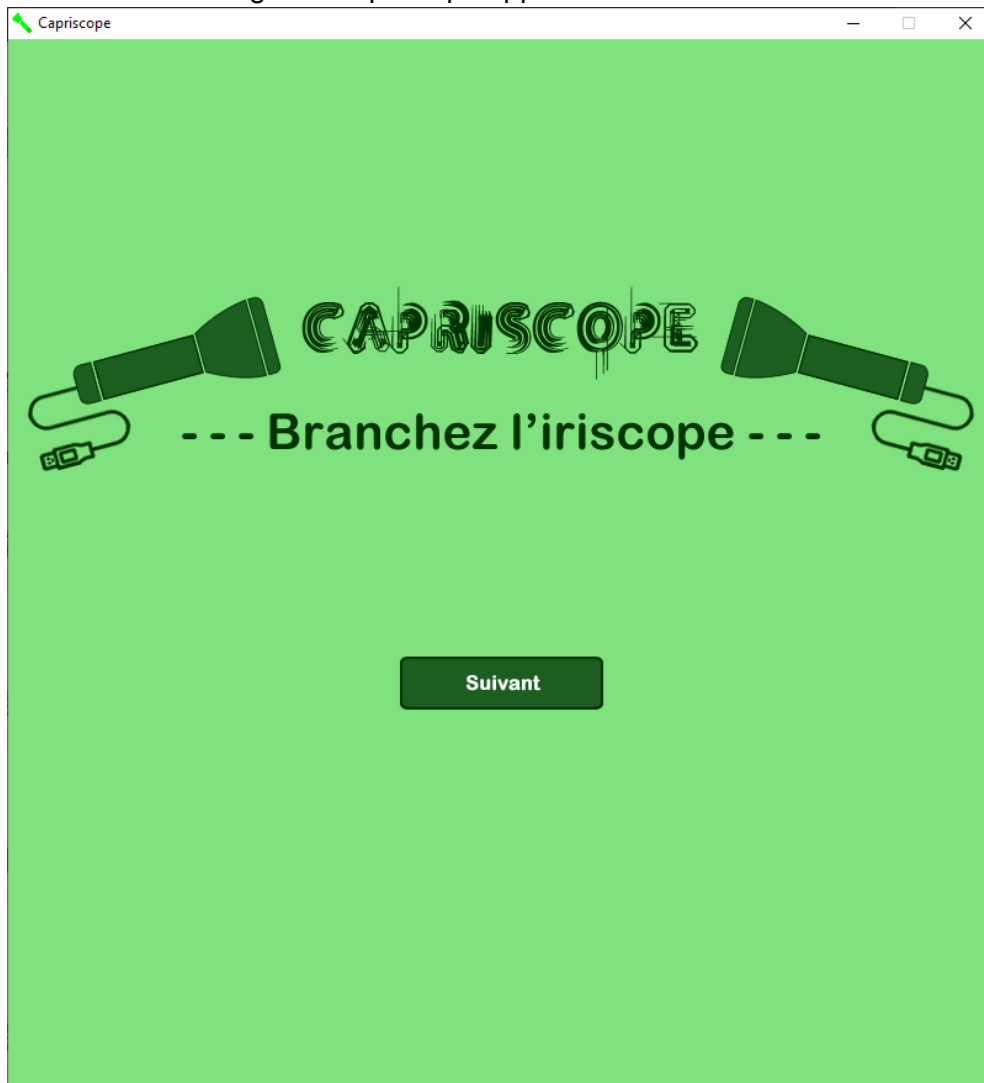

- Si ce n'est pas déjà fait, brancher l'iriscope puis cliquer sur suivant

b. Connexion de l'iriscope

- L'écran de chargement apparaît

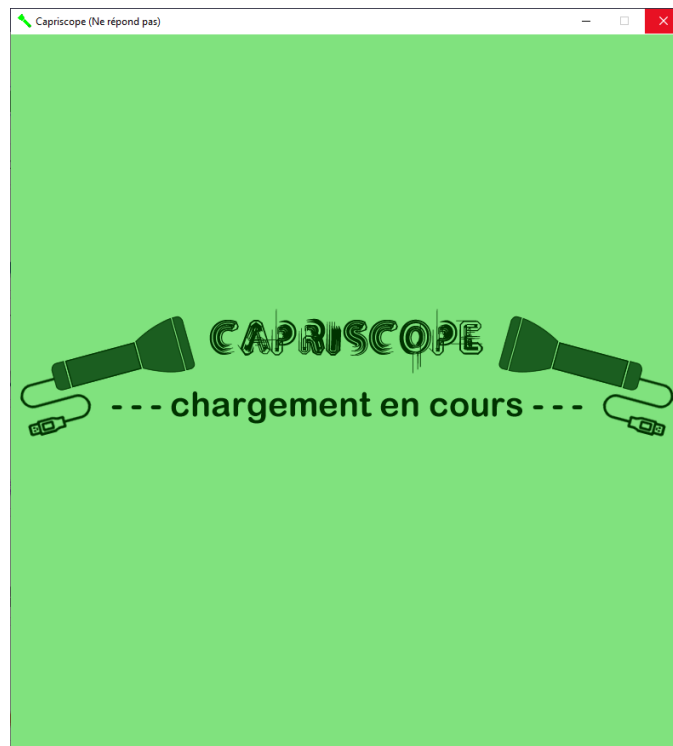


- Attendre que l'iriscope se charge et que l'écran de sélection apparaisse




- Plusieurs caméras peuvent apparaître, il faut identifier l'iriscope puis cliquer sur l'image correspondante afin de sélectionner l'iriscope. (Dans l'exemple seul l'iriscope était connecté à l'ordinateur, c'est pourquoi il n'y qu'une image)

c. Prise de photo

- L'écran de capture apparaît

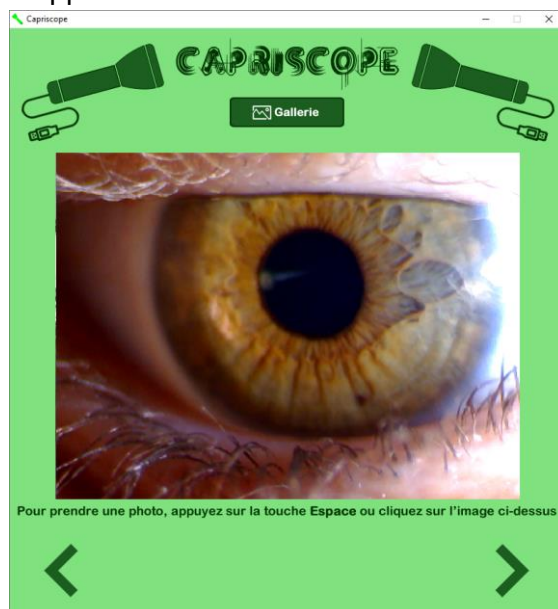


- A partir de cette fenêtre, il est possible de :
 - visionner la prise de vue de l'iriscope en direct
 - prendre une capture en appuyant sur la touche **espace** du clavier ou en **cliquant sur la prise vue**
 - aller sur la galerie en cliquant sur le bouton *Galerie*
 - parcourir l'historique des photos en bas (vide sur l'image) et cliquer sur une photo pour l'agrandir et la modifier
- Une fois la prise de vue capturée en appuyant sur la touche espace du clavier ou en cliquant sur la prise de vue, la fenêtre de validation apparaît

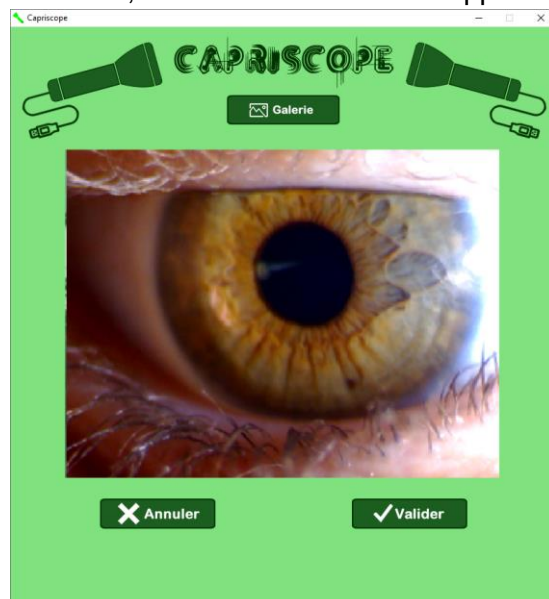


- Cliquer sur Valider pour enregistrer la capture ou sur le bouton Annuler pour recommencer la capture

d. Affichage des photos

- Après avoir cliqué sur le bouton *Galerie* la fenêtre de galerie des photos apparaît

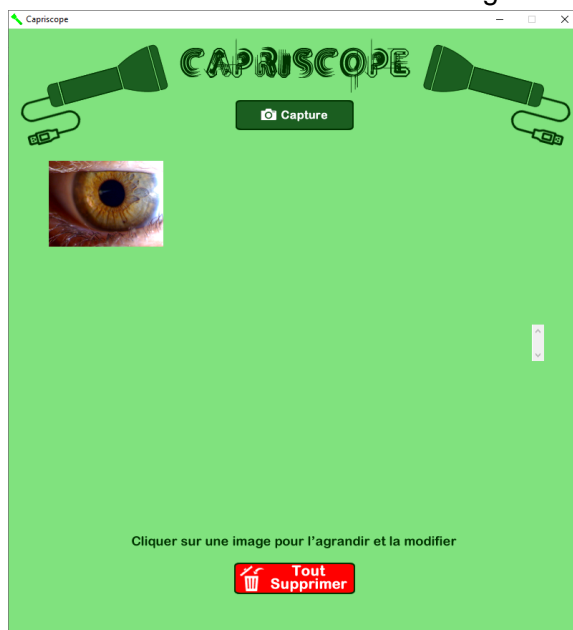


- A partir de cette fenêtre, il est possible de :
 - Cliquer sur une photo pour l'agrandir et pouvoir la modifier ou la supprimer
 - Cliquer sur le bouton *Capture* pour retourner à la prise de vue
 - Cliquer sur le bouton *Tout Supprimer* pour supprimer toutes les photos enregistrer
- Après avoir cliqué sur une photo, la fenêtre d'agrandissement apparaît

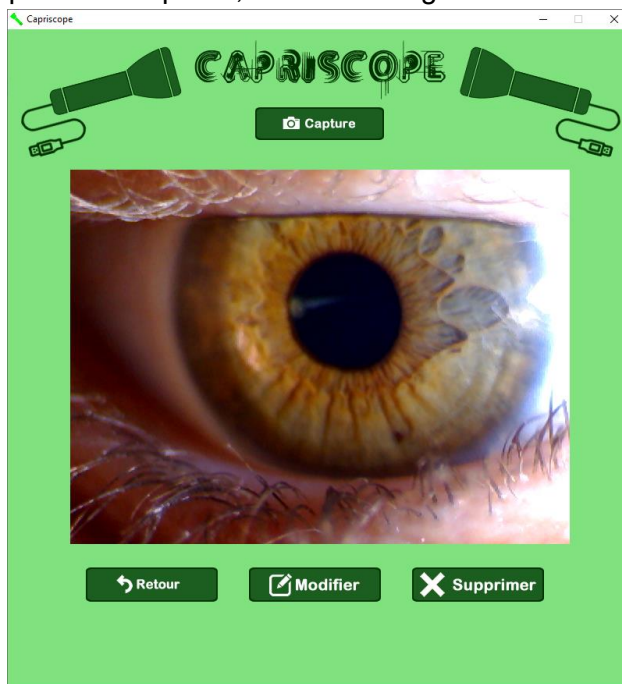




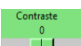


- A partir de cette fenêtre, il est possible de :
 - Cliquer sur le bouton *Capture* pour retourner à la prise de vue
 - Cliquer sur le bouton *Retour* pour retourner à la galerie
 - Cliquer sur le bouton *Modifier* pour ouvrir la fenêtre de modification
 - Cliquer sur le bouton *Supprimer* pour supprimer la photo

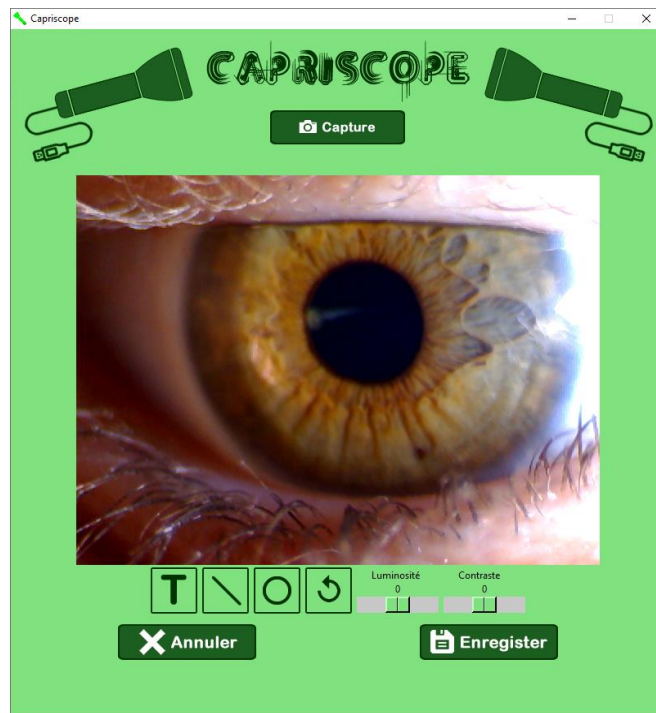e. Modification des photos

- Après avoir cliqué sur le bouton *Modifier*, la fenêtre de modification de la photo apparaît



- A partir de cette fenêtre, il est possible de :
 - Cliquer sur le bouton *Capture* pour retourner à la prise de vue
 - Cliquer sur le bouton *Annuler* pour annuler les modifications et revenir à la fenêtre précédente
 - Cliquer sur le bouton *Enregistrer* pour enregistrer les modifications dans un fichier spécifique
 - Utiliser les outils suivants :
 -  : permet d'écrire du texte sur la photo
 -  : permet de dessiner une ligne sur la photo avec la mesure de sa longueur en pixel
 -  : permet de dessiner un cercle sur la photo avec la mesure de son diamètre en pixel
 -  : permet de supprimer le dernier dessin sur la photo
 -  : permet le réglage de la luminosité de la photo
 -  : permet le réglage du contraste de la photo
- Pour utiliser les outils texte, cercle et ligne, il faut d'abord sélectionner l'outil en cliquant dessus puis cliquer sur l'image pour la modifier (maintenir le clic enfoncé en déplaçant le curseur de la souris pour les outils cercle et ligne pour dessiner)
- Pour déplacer le dernier dessin, faire un clic droit à l'endroit où il faut le déplacer. En maintenant le clic, le dessin suit le curseur de la souris